

# FEGUPOL High-Lustre

Полировочная паста для Зеркальный блеск  
Polishing paste for high-lustre surface polishing

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ONLY FOR DENTAL USE BY QUALIFIED PERSONNEL



D-74722 Buchen-Hettingen



Feguramed GmbH  
Jahnstr. 2  
74722 Buchen (Odenw.)Germany  
Tel. +49 (0)6281/5227-0 -15  
www.feguramed.com

MADE IN GERMANY

## Информация о применении

## Русский

### Показания:

Полировочная паста для Зеркальный блеск:  
- стоматологический сплав на основе кобальта-хрома-молибдена  
- сплавов благородных металлов  
- акриловых пластмасс протезов  
- Композитный пластик

### Обработка:

#### 1. Предварительная полировка:

1. или 2. режим работы на полировочном моторе с пастой.

Мы рекомендуем щетки (Ø 40 – 80 мм) 3 или 4 ряда с или без вставок из волокон рами.

#### 2. Зеркальный блеск:

Полировочные круги из волокон рами или из шерсти (Ø 40 – 80 мм) во 2. режиме работы



### Хранение:

Хранить при температуре не выше 25 °C. Избегать попадания прямого солнечного света. После применения ёмкости следует всегда закрывать и хранить в недоступном для детей месте.

### Продажная единица

REF

8067 Fegupol High-Lustre 300 грамм

## Instructions for use

## English

### Indication:

Polishing paste for high-lustre polishing of:  
- Non-precious alloys (Cobalt Chrome)  
- Precious metal alloys  
- Acrylic denture resins  
- Composites

### Technique:


#### 1. Pre-polishing:

With polishing paste at the dental lab lathe (1<sup>st</sup> or 2<sup>nd</sup> gear).

We highly recommend brushes (Ø 40 – 80 mm) with multiplerows including black bristleand cotton.

#### 2. High-lustre surface polishing:

With cotton maps (Ø 40 – 80 mm) at the dental lab lathe (2<sup>nd</sup> gear ).

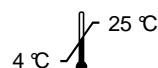

### Storage:

Don't store above 25 °C. Keep away from sunlight. Keep locked up and out of reach of children. Keep container tightly closed.

### Presentation:

REF

8067 Fegupol High-Lustre 300 g