

Fegura[®] Tray

Светоотверждаемый материал для изготовления индивидуальных ложек

Fegura[®] Tray - это светоотверждаемая пластмасса для изготовления

- индивидуальных оттисковых ложек (частичная и полная адентия)
- функциональных ложек (беззубая челюсть)
- базисов восковых моделей
- базисов прикусных валиков
- для блокировки вторичных конусных и телескопических коронок

Пластмасса готова к применению и её можно легко адаптировать на модели.

Отверждение:

Fegura[®] Tray подвергается обработке при дневном и искусственном освещении в течение примерно 20 минут и можно провести её светоотверждение при помощи любого светополимеризующего аппарата (галогенового- или УФ-типа при длине волн около 350 - 400 нм).

Применение:

Перед применением температуру материала следует своевременно довести до комнатной температуры. Пластину для изготовления ложки следует извлечь из бокса и бокс сразу закрыть опять светонепроницаемо. На гипсовой модели очертить границы индивидуальной ложки. Если необходимо, следует разместить наполнитель места. В том случае, если наполнитель места не нужен, следует изолировать гипсовую модель при помощи изоляционного средства. С пластины снимается защитный войлок и она обжимается по модели, формируется и обрезается по обозначенным границам. Ручку индивидуальной ложки можно оформить из излишек материала. Полимеризация осуществляется на гипсовой модели при помощи светополимеризующего аппарата (галогеновый- или УФ-свет). В зависимости от толщины сформированной ложки её следует отверждать от 3 до 5 минут. Затем ложку снять с модели и отвердить её с другой стороны ещё раз от 3 до 5 минут. В случае необходимости следует продлить время экспонирования.

Отвердевшая ложка готова к применению и её можно обработать обычным способом.

Удалить ингибиторный слой:

Удалить ингибиторный слой, возникший из-за проникновения кислорода, можно тканью, увлажненной алкоголем.

Обработка:

Обработать индивидуальную ложку при помощи фрез из твердого металла и наждачной бумаги.



Шлифовальную пыль не вдыхать, использовать подходящую вытяжку!

Изготовитель:

Feguramed GmbH • Jahnstr. 2 • D-74722 Buchen-Hettingen
Тел. +49 (0)6281 / 5227-0 • Факс +49 (0)6281 / 5227-15
www.feguramed.com



D-74722 Buchen-Hettingen

В редких случаях возможны сенсбилизация и раздражения на полимеры акрилата.



Дезинфекция:

Оттиски с ложкой перед тем, как их передать дальше, следует подвергнуть дезинфекции. Продолжительность дезинфекции зависит от указаний соответствующего изготовителя дезинфекционного средства.

Противопоказания

Не применять **Fegura® Tray** в тех случаях, когда известна повышенная чувствительность на полимеры акрилата!

Хранение/Годность:



Минимальный срок годности при хранении при температуре ниже 20 °C: 3 года

Хранить в закрытом виде и при температуре не выше 23°C!

По истечении срока годности - смотри на этикетку бокса - **Fegura® Tray** больше не применять!


Продажные единицы:

1 бокс содержит 50 пластин (шаблоны) для верхней и нижней челюсти

Цвета: натуральный, розовый и голубой

| | | |
|------|------|---|
| REF: | 6061 | 1 бокс для верхней челюсти пластины натурального цвета |
| | 6062 | 1 бокс для верхней челюсти пластины розового цвета |
| | 6063 | 1 бокс для верхней челюсти пластины голубого цвета |
| | 6065 | 1 бокс для нижней челюсти пластины натурального цвета |
| | 6066 | 1 бокс для нижней челюсти пластины розового цвета |
| | 6067 | 1 бокс для нижней челюсти пластины голубого цвета |
| | 6068 | 1 бокс базисных пластин (толщина 1,4 мм) розового цвета |

Меры предосторожности

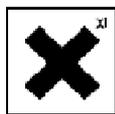

Продукт раздражает глаза, дыхательные пути и кожу, избегать попадания продукта в глаза. При контакте продукта со слизистой глаз, глаза следует тщательно промыть водой и, в случае необходимости, обратиться к врачу. При соприкосновении продукта с кожей следует сразу смыть его обильным количеством воды с мылом.



Изготовитель:

Feguramed GmbH • Jahnstr. 2 • D-74722 Buchen-Hettingen

Тел. +49 (0)6281 / 5227-0 • Факс +49 (0)6281 / 5227-15

www.feguramed.com