

<b>Наименование продукта:</b>	<b>acry F711</b>
<b>Цвет:</b>	Натурально розовый
<b>Упаковка:</b>	Россыпью, 100 г продукта или пять больших наполненных алюминиевых контейнеров, диаметром 25 мм / 28 мм
<b>Характеристика:</b>	Полиметакрилат для использования методом инъекционного литья, с добавлением высококачественных красителей в прозрачных оттенках. <b>acry F711</b> - прозрачен, очень эстетичен, освобожденный от мономеров, гипоаллергичный, чрезвычайно прочный, легко полируемый. Его корректировка, починка, перебазировка возможна как в лаборатории, так и в клинике любым видом акрила.
<b>Предназначение использования:</b>	Медицинский продукт 1 класса в соответствии с MDD 93/42EEC  Для производства съёмных зубных протезов в стоматологических лабораториях. Материал предусмотрен для использования со всеми моделями аппаратов технологии инъекционного литья.
<b>Параметры использования:</b>	- Температура плавления: 270 °C - Время перед инъекцией и время нагрева: Таймер 1: 19 минут Таймер 2: 5 минут - Поддержание давления во время охлаждения: Таймер 3: 20 минут - Инжекционное давление: 8 бар  Для подробного описания использования материала <b>acry F711</b> с аппаратом EVOX V8 фирмы EVOLON смотрите Техническое Руководство машины EVOX V8 . Для использования с EVOX V8 Программа 09 .  Для корректного использования материала <b>acry F711</b> и полного комплекта инъекционной технологии фирмы EVOLON рекомендован курс обучения технологии на базе фирмы EVOLON, или на базе авторизованных дилеров EVOLON.
<b>Содержание изделия из acry F711:</b>	Рекомендовано очищать протезы <b>acry F711</b> в растворе концентрированного порошка D-Cleaner 306 / продукция фирмы EVOLON /.

#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

**Ингаляции:** избегайте вдыхание паров вследствие нагревания материала. В случае ингаляции, немедленно выйти на свежий воздух. Оценить необходимость искусственного дыхания и обеспечить немедленное медицинское вмешательство.  
**Контакт с глазами:** немедленно промойте глаза проточной водой в течение по крайней мере 15 минут. Если раздражение развивается, обращайтесь немедленно за медицинской помощью.  
**Контакт с кожей:** если контакт происходит, кожу немедленно промыть холодной водой. Не пытайтесь удалить материал с кожи или с загрязненной одежды, так как возможны повреждения и разрывы. Носить защитные перчатки. В мерах профилактики должен быть легко доступен душ.

**ХРАНИТЕ ПРОДУКТ В ОРИГИНАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В СУХОМ, ЧИСТОМ И ХОРОШО ВЕНТИЛИРУЕМОМ МЕСТЕ.  
НЕ ЭКСПОНИРОВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА.  
ДЕРЖИТЕ ВДАЛЕКЕ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА И ВОСПАЛЯЕМЫХ ВЕЩЕСТВ.  
ДЕРЖИТЕ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.**



Только для профессионального использования

Уважаемые партнёры,  
Вы выбрали высококачественный продукт фирмы EVOLON Ltd.  
Благодарим вас за доверие к нашим материалам и за ваш выбор в пользу фирмы EVOLON.

Для максимальной эффективности процесса производства и высоких эстетических результатов мы рекомендуем использование нашего аппарата для инъекционного литья EVOX V8, а так же комплекс всего спектра успешных материалов инъекционной технологии, специально разработанных для эффективного совместного использования. Вы извлечете реальную пользу из обширного опыта, накопленного фирмой EVOLON в процессе разработки и внедрения набора продукции этой системы.

В случае возникновения дополнительных вопросов по технологии и комплекту материалов, просим обратиться к вашему местному представителю фирмы EVOLON за дополнительной информацией и подробностями. EVOLON предоставляет всестороннюю техническую поддержку. Всегда к вашим услугам.

С уважением,

Отдел поддержки и обслуживания  
компании EVOLON

**Важное примечание:** Практическое использование материала пользователем без какого-либо контроля со стороны Компании, следовательно, попадает под ответственность самого пользователя. Любая ответственность за нанесенный вред или понесенные убытки ограничивается стоимостью продукции, представленной Компанией и использованной пользователем